

シンウルトラシリーズ

座王X座王

軽量車いす

リクライニング車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製スタンダード車いす

スチール製スタンダード車いす

介護・福祉用具

ストレッチャー・防災用品・カートなど

車いすオプション

工具なしでシート幅が調整でき、体の大きめのご利用者様に幅広く対応します。(シート幅42・44・46cmの3段階調整式)

**NA-SU7・Hi** 補装具車椅子 レディメイド **249,500円** (非課税)  
00175-000435 **耐120kg** **自走行**

**NAH-SU7・Hi** 補装具車椅子 レディメイド **249,500円** (非課税)  
00175-000436 **耐120kg** **介助用**

3D 幅 Cトラム 座面高Hi(高) ゆったりハイバック

IN OUT PU 折

シート幅調整式 SU7タイプ シン・ウルトラ 自走行

タイヤ径 外径 φ 20

前座高 調節式\*1 43・45・47 cm

ノーパンクタイヤ **エアリ~** 装備

いつでも空気がいっぱいのご感覚で安心

3D 幅 Cトラム 座面高Hi(高) ゆったりハイバック

IN OUT PU 折



シート幅調整式 SU7タイプ シン・ウルトラ 介助用

タイヤ径 外径 φ 20

前座高 調節式\*1 43・45・47 cm

ノーパンクタイヤ **エアリ~** 装備

いつでも空気がいっぱいのご感覚で安心

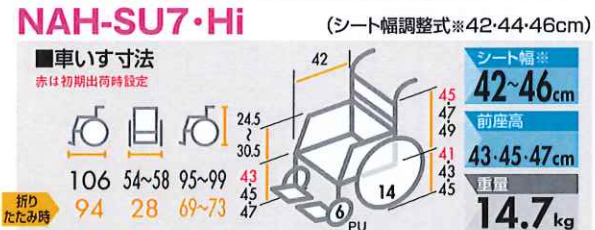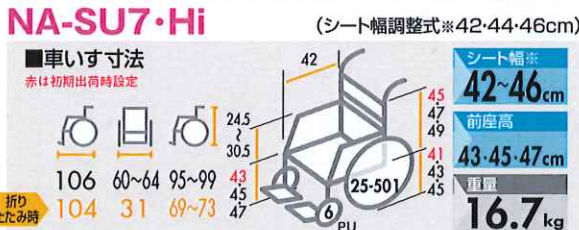

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

## 工具いらず、簡単操作でシート幅調整。

■工具いらず、簡単操作でシート幅調整

手順1: バックサポートシートと座クッションをはずし、インナーシートの面ファスナーをはずします。

手順2: カバーをはずし、ロックピンをつまんでロックを解除します。

手順3: そのまま折りたたみフレームを任意の位置までスライドします。

手順4: ロックが完全にかかっていることを確認し、カバーをかぶせます。

手順5: インナーシートの面ファスナーを貼りあわせ、バックサポートインナー下部を調整し、アウターシートと座クッションを装着して完了です。



▲シート幅の調整で体形の変化や着こみにも対応します。



バックサポート高 簡単調整

インナーシートを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ)

### 標準フレームカラー

標準フレームカラー



### 標準バックサポートカラー

標準バックサポートカラー



ご注文時には、バックサポートカラーをご指定ください。

①NA-SU7・Hi ②NAH-SU7・Hi

■オプション対応

KF-28 マルチボンベ架	①	②
	△	△

KF-28 マルチボンベ架

新車注文時 **14,100円** (非課税)

TAIS: 00175-000441

※△アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。