

工具なしでシート幅が調整でき、小柄な体格のご利用者様に幅広く対応します。(シート幅38・40・42cmの3段階調整式)

NA-SU7・Lo 補装具車椅子 レディメイド **249,500円 (非課税)**
00175-000437 **耐100kg 自走用**



3D **幅** **CDラム** **座面高Lo(低)**

IN OUT **PU** **折**

シート幅調整式 **SU7**タイプ シン・ウルトラ **自走用**

フィッティング 外径 φ 20

前座高 調節式*1 **36・38・40** cm

ノーバンクタイヤ **エアリ** 装備

いつでも空気がいっぱい感覚で安心

NAH-SU7・Lo 補装具車椅子 レディメイド **249,500円 (非課税)**
00175-000438 **耐100kg 介助用**



3D **幅** **CDラム** **座面高Lo(低)**

IN OUT **PU** **折**



シート幅調整式 **SU7**タイプ シン・ウルトラ **介助用**

フィッティング 外径 φ 20

前座高 調節式*1 **36・38・40** cm

ノーバンクタイヤ **エアリ** 装備

いつでも空気がいっぱい感覚で安心

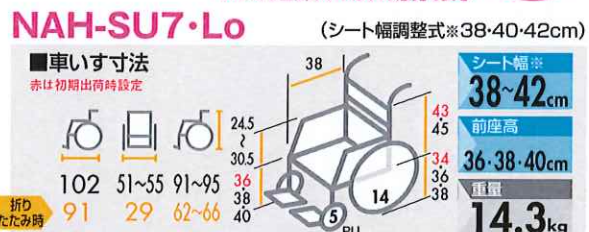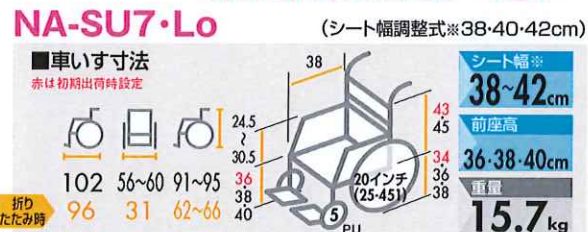

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同寸です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同寸です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

工具いらず、簡単操作でシート幅調整。

■工具いらず、簡単操作でシート幅調整



手順1: バックサポートシートと座クッションをはずし、インナーシートの面ファスナーをはずします。

手順2: カバーをはずし、ロックピンをつまんでロックを解除します。

手順3: そのまま折りたたみフレームを任意の位置までスライドします。

手順4: ロックが完全にかかっていることを確認し、カバーをかぶせます。

手順5: インナーシートの面ファスナーを貼りあわせ、バックサポートインナー下部を調整し、アウターシートと座クッションを装着して完了です。



▲シート幅の調整で体形の変化や着こみにも対応します。



バックサポート高簡単調整
インナーシートを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(2段階、2cmピッチ)

標準フレームカラー



標準バックサポートカラー



ご注文時には、バックサポートカラーをご指定ください。

①NA-SU7・Lo ②NAH-SU7・Lo

■オプション対応

KF-28 マルチボンベ架	①	②	※
---------------	---	---	---

KF-28 マルチボンベ架

新車注文時 **14,100円 (非課税)**

TAIS: 00175-000441

※△アームサポートの跳ね上げの際は、ボンベやその付属品にアームサポートが接触しないようご注意ください。

シン・ウルトラ シリーズ

座王×座王 シリーズ

軽量車いす

テイルト リクライニング 車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製 スタンダード 車いす

スチール製 スタンダード 車いす

介護・福祉用具

ストレッチャー! 防災用品、カートなど

車いす オプション